

GlobeScope, s.r.o.  
Slavojova 579/9  
128 00 PRAHA 2  
IC: 06402160  
W: [www.globescope.cz](http://www.globescope.cz)  
E: [info@globescope.cz](mailto:info@globescope.cz)

The logo for GlobeScope, featuring the word "globescope" in a lowercase, blue, sans-serif font. The logo is set against a dark grey rectangular background.

### **DOPORUČENÍ K POUŽITÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ - sliny**

1. Zkontrolujte obsah testovací sady.
2. Nastudujte si návod použití antigenního testu.
3. Testujte se ideálně ráno před jídlem a pitím.
4. Plivejte více hlen než sliny (POZOR na bublinky, nesmí být ve vzorku bublinky ze slin), test pak nemusí zaznamenat správnost průběhu testu.
5. Množství - ideálně 2 ml (cca 2 plivnutí).
6. Do odběrového kapátka – vzorek odebírejte ideálně ze spodní části již zmixovaného roztoku, ať nenabíráte bubliny.
7. Odběrové kapátku naplňte tak cca do poloviny, ať máte 2 velké kapky, které poté nanese na test.